

KLING PROMERA

ASIAKASTUKI

Magneettipinsetti silmän

Magneettinen pinsettikynä metallihippujen poistoon silmistä.

- Jos roska on magneettinen, laita magneettipinsetti silmän lähelle n. 1/2 cm etäisyydelle, ei silmään. Liikuta pinsettiä niin, että roska tarttuu siihen.
- Roskan ollessa puuta tai alumiinia käytä poistamiseen pinsetin silmukkaa, joka on pinsetin toisessa päässä. Vedä silmukkaa silmässä ulkosyrjältä sisäsyrylle, kunnes roska on poistettu.
- Huuhteile silmä roskan poistamisen jälkeen käyttäen Promera Eyewashia. Voit huuhdella silmän myös ennen silmukan käyttöä silmän kostuttamiseksi.
- Desinfioi pinsetti käytön jälkeen.

Roskan ollessa silmässä yritä ensin poistaa se käyttämällä Eyewash spraytä.

