

# KLING PROMERA

ASIAKASTUKI  
BLODSTOPP

**Blodstopp on verenvuodon tyrehtyttävä suihke, joka soveltuu pienten ja vuotavien haavojen hoitoon.**

**Tuotteen kuvaus:**

- Tuotteen sisältämä selluloosa supistaa haavaa ympäröiviä verisuonia
- Tuotteen viilentävä vaikutus puuduttaa haavaa ja edesauttaa verisuonien supistumista
- Nopeuttaa haavan paranemista
- Auttaa haavaa pysymään steriilinä

**Käyttö:**

- Suihkuta tuotetta 3-5 sekuntia noin 10 cm päästä haavasta
- Tuote alkaa vaikuttaa 2-3 minuutin kuluessa
- Käytettäessä nenäverenvuotoihin suihkuta tuotetta paperi tuppoon ja työnnä paperituppo nenään
- Käytä yhdessä laastarin kanssa

**HUOM!** Tuote ei sovellu suurten haavojen hoitoon. Haavan ollessa suuri sido haava ja ota yhteyttä lääkäriin.läkarvård.

